



## Amplificador telefónico de bolsillo

### Válido para

- Audífono
- Implante coclear
- Implante osteointegrado
- Pérdida ligera sin adaptar



### Descripción

Este práctico amplificador puede usarse en cualquier teléfono fijo o inalámbrico e incluso algunos móviles. Es la solución ideal para viajes, o cuando se vaya a estar en cualquier sitio que se tenga que hablar por teléfono y por cualquier circunstancia no esté amplificado.

Simplemente, se coloca el amplificador en el auricular del teléfono sujeto por su goma y se enciende de la ruleta lateral. Se ajusta el volumen al deseado y se vuelve a desconectar al terminar la conversación.

Un gran amplificador con un tamaño de bolsillo.

Funciona con una pila tipo AAA.

