


## Tabla para medida de la funda mas adecuada

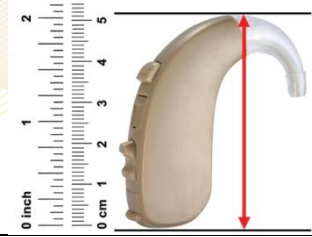

**Funda Mini Curva y  
Mini Cuadrada:**  
Para audífonos de  
2,5 a 3,5 cms.



**Funda Original:**  
Para audífonos de  
3,5 a 5cms.



**Funda FM:** para  
audífonos con FM  
incorporada de 5 a  
7 cms.




La funda **Coclear** encaja en la mayoría de procesadores de Medel,  
Cochlear y Advanced Bionics



## Influencia de las fundas sobre el sonido

Este gráfico es el resultado de un análisis electroacústico llevado a cabo por Oticon. La línea verde muestra el sonido que llega al audífono sin la funda Ear Gear y la línea rosa muestra el sonido a través de Ear Gear. El resultado de ésta prueba muestra que no hay más de 1 dB de diferencia entre ambas y no afecta nada a la direccionalidad. Es decir, son prácticamente transparentes al sonido.

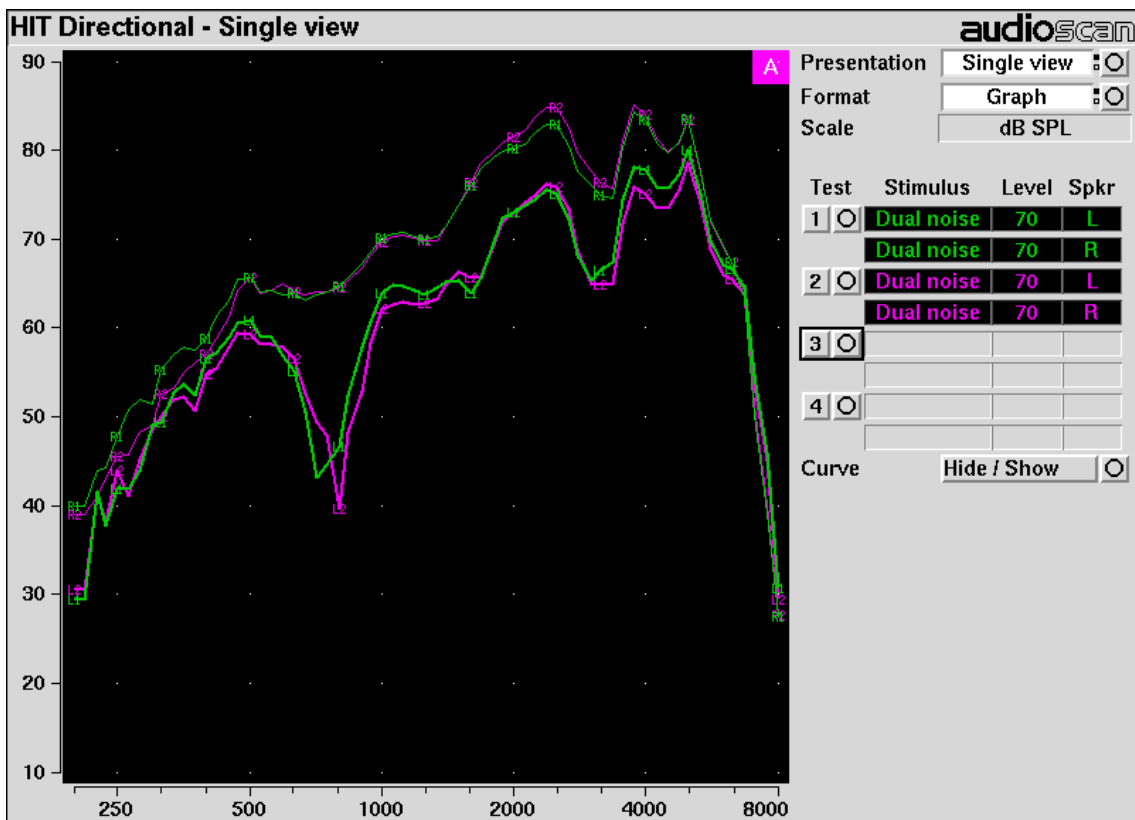

## Preparación para inserción de la funda en la prótesis

Algunos audífonos precisan de una sencilla preparación para instalar fácilmente la funda protectora. Siga los pasos de abajo según su tipo de prótesis auditiva.

### Molde

Separe el tubo del molde del codo del audífono. Para hacerlo, no estire del molde, sino del tubo.



### Punta de Silicona

Extraiga la punta de silicona estirando suavemente de la misma



### RITE

No se necesita preparación. Simplemente deslice el micromolde a través de la funda protectora.



### Implante Coclear

Desconecte la antena del procesador de palabra



## Inserción de la funda en el audífono

### 1.- Quitar el molde

Quite el molde junto con su tubo del codo del audífono.



### 2 y 3 - Inserción

Inserte el codo por el extremo de la funda con la abertura mas grande y deslícela sobre el cuerpo del audífono hasta que el codo salga por el extremo con el agujero mas pequeño de la funda.



### 4.- Sujeción del molde

Coloque de nuevo el molde en el codo del audífono.



## Inserción de la funda en el Implante Coclear

### 1.- Quitar la Antena.

Quite la antena del procesador. Inserte el codo por la abertura lateral y después a través del hueco en la parte superior de la funda.



### 2 .- Encaje.

Deslice la funda sobre el cuerpo del procesador hasta que esté encajado en la misma.



### 3.- Conexión de la Antena.

Conecte de nuevo la antena de transmisión.



## Inserción del BAHA

Inserte el BAHA por la abertura de la funda y encaje el clip del pilar en el agujero cuadrado previsto al efecto.

