

AURICULAR INDUCTIVO MONOFONICO

Auricular inductivo anatómico con conector estereo de 3.5mm para uso con audífonos retroauriculares y procesadores de implante coclear.

El auricular inductivo proporciona una salida magnética para el uso de la prótesis auditiva en la posición T. Este sistema transmite la señal monofónica, ya que posee solamente un auricular con forma de gancho que se adapta al pabellón auditivo de uno de los oídos. El auricular inductivo se puede usar con cualquier equipo que tenga un conector de audio de 3.5mm como por ejemplo Ipods, mp4, ...

Sitúe el auricular en forma de gancho en el pabellón auditivo entre la prótesis y la cabeza y enchufe el conector al reproductor. Cambie su prótesis a la posición T. En el momento que reproduzca la señal, usted la escuchará a través de su prótesis.

La intensidad de la inducción magnética recibida varía con la posición relativa del gancho con la prótesis. Muévalos hasta tener la señal óptima.

