

Instrucciones de uso para los tapones de silicona Pluggerz

Colocación

- 1.- Verificar que el producto esté limpio antes de usarlo.
- 2.- Tirar ligeramente la parte superior del oído hacia arriba y hacia atrás.
- 3.- Insertar el tapón profundamente en el canal auditivo.
- 4.- Soltar la oreja y sujetar brevemente el tapón.

¡Atención!

Cuando el producto esté insertado incorrectamente o cuando las instrucciones no son respetadas, esto afecta negativamente a la protección que brinda Pluggerz. El contacto con determinados productos químicos también puede afectar la protección.

Mantenimiento

Pluggerz son tapones para los oídos reutilizables. Ofrecen protección en ambientes ruidosos siempre y cuando estén correctamente puestos permanentemente. Pluggerz están hechos de silicona, que es un material natural, sostenible e inofensivo para la piel. El producto se limpia con agua y jabón para garantizar la higiene. Verifique que el producto esté seco antes de ponerlo en su envase.

La evaluación para la Marca CE de la Unión Europea fue elaborada por PZT 1974, Wilhelmshaven, Alemania. Los niveles de atenuación de los tapones fueron calculados de acuerdo con la norma EN 352-2:2002 y medidos según EN 13819-2:2-2. Los valores APV, SNR, H, M y L fueron calculados según la norma ISO 4869-2.

Peso por juego: 1,6 gramos. Diámetro 7-12 mm.